


Unité d'Appel Sanitaire - Passive - avec cordon ou tirette

NIPC-W3P

Caractéristiques

- Se connecte sur le bus passif de l'unité d'appel bloc de porte ou de l'unité d'appel sanitaire active.
- Ne nécessite pas d'adresse sur le bus de chambre lorsqu'elle est connectée sur l'unité d'appel bloc de porte
- Conçue pour être utilisée dans les salles de bains, les toilettes et surfaces similaires
- Appel activé par tirette/cordon long de 2m ou en appuyant sur le bouton rouge
- Contient 3 boutons de fonctions (rouge, jaune, vert)
- Disponible en blanc
NIPC-W3P = blanc

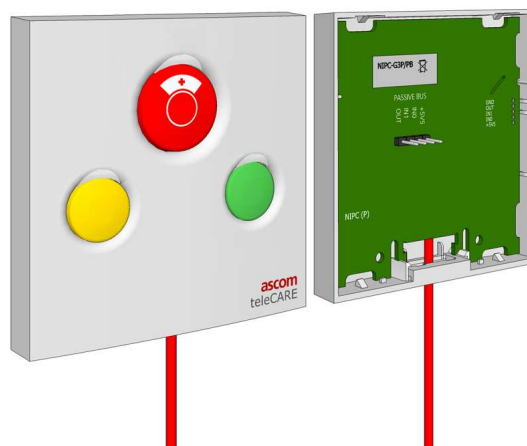

Description

L'unité d'appel sanitaire passive avec cordon du système teleCARE IP est conçue pour une utilisation, dans les toilettes, les salles de bains. Elle doit être connectée sur le bus passif de l'unité d'appel bloc de porte ou de l'unité d'appel sanitaire active.

Elle peut être associée avec une unité d'annulation passive sur le même bus passif. Le bus passif se présente sous forme de quatre fils : +5.5V, In0, In1, Out

L'unité d'appel sanitaire passive avec cordon est disponible en blanc. Elle est munie d'un cordon/tirette de 2 mètres de long pour l'activation des appels, de 2 sphères plastiques déboîtables de sécurité et ainsi que de 3 boutons de fonctions: rouge, vert, jaune.

Le bouton Rouge sert pour les appels, les fonctions des boutons Jaune et Vert sont configurables pour donner des fonctions telles que l'annulation toilettes, la présence infirmière, l'appel d'assistance et l'appel d'urgence. Sur le bouton rouge, il y a une LED rouge qui s'éclaire pour indiquer un appel

Note: Le bornier de raccordement 4 points (bornier à pression), nécessaire pour le bus de chambre, n'est pas fourni avec l'unité. Il est disponible comme accessoire et doit être commandé séparément.

L'unité d'appel sanitaire passive avec cordon a besoin d'un support ou plaque arrière simple qui doit être commandé séparément. La plaque arrière permet à cette unité d'appel d'être montée sur différents types de boîtiers encastrables. Et aussi, une entretoise avec kit d'installation est disponible pour le montage de l'unité d'appel.

Une protection plastique transparente, WAC, Wet Area Cover, augmente le degré de protection (humidité projection d'eau) jusqu'à IPX3. Elle s'adapte et s'ajuste sur l'unité. Elle est scellée à l'aide d'un mastic silicone.

Tous les produits teleCARE IP d'Ascom, y compris l'unité d'appel sanitaire passive avec cordon ne contiennent pas de plomb et sont entièrement conformes à la directive RoHS 2002/95/EC.

Spécifications Techniques

Dimensions: (Lx l x h)	91mm x 91mm x 17 mm
Matériau:	Plastique PC/ABS
Couleur:	NIPC-W3P: blanc (RAL 9010) Boutons: Rouge: (NCS S0580 - Y90R) Jaune: (NCS S0550 - G90Y) Vert: (NCS S2060 - G)
Connexions:	1 connecteur 4 points pour le bus passif
Entrée Alimentation:	5.5V / DC (depuis l'unité Bloc de porte)
Consommation:	En veille 0mA Maxi. 10mA à 5.5V
Environnement:	Température de fonctionnement: de 0 à +40°C Humidité Relative : 30 - 80% (sans condensation)
Standards:	CE EN 55022:2006 + Amendment A1:2007 EN 55024:1998 + Amendment A1:2001 + Amendment A2:2003 EN 60950-1:2006 (Ed. 2) EN 60601-1:2006 EN 60601-1-2:2007 EN 60601-1-6:2007 EN 60601-1-8:2007 VDE 0834 IP40, EN 60529: Protection RoHS - Conforme sans plomb
Accessoires:	NICT-4AA - Connecteur 4-points R281145 - Support, Plaque arrière simple - Blanc R281149 - Support en saillie simple avec kit d'installation R281098 - Sphère de remplacement pour cordon/tirette R281238 - Protection WAC, Wet Area Cover