

Unité d'appel et d'annulation

ascom

avec buzzer de renvoi sonore et prise auto-extractible pour mini manipulateur avec télécommandes d'éclairage .

REF : NPWU2-BFMA

Ancienne réf : TC113400B

Description.

Unité d'appel murale équipée de 3 boutons et d'une prise auto-extractible pour le raccordement d'un mini manipulateur teleCARE équipée de 2 télécommandes d'éclairage.

Utilisation système :

teleCARE SB, teleCARE SC teleCARE M

teleCARE WL (lorsque l'unité est raccordée à une unité d'appel radio)

Cette unité comprend :

- un large bouton rouge, avec un symbole infirmière, appel patient
- un bouton vert, annulation d'appel réservé au personnel de soins.
- un bouton jaune, également réservé au personnel de soins.
- une prise auto-extractible pour le raccordement d'un mini manipulateur étanche teleCARE
- un buzzer de renvoi sonore intégré

Elle s'installe à l'aide d'une plaque de fixation qui offre l'avantage de s'adapter sur la plupart des coffrets standards d'encastrement.

Une entretoise de fixation est également disponible pour un montage en saillie.

Quel que soit le besoin, la plaque ou l'entretoise de fixation est à commander séparément.

Accessoires complémentaires :

- | | |
|---|---------------------|
| - Plaque de fixation | R281145 (TC811100B) |
| - Entretoise de fixation | R281149 (TC811150B) |
| - Câble de liaison pour double ou triple module | R190192 (TC810100) |
| - Câble de liaison pour double ou triple module avec entretoise | R190193 (TC810000) |

Fonctions configurables (suivant système) :

Les fonctionnalités des boutons Rouge et Jaune sont paramétrables à l'aide de plots à souder sur le circuit imprimé.

Ceci permet d'affecter à ces boutons, suivant les applications, les sorties SET /RESET ou R+S.



Fonctions disponibles.



Appel normal



Annulation d'appel / Appel d'urgence / Présence



Annulation d'appel / Appel d'urgence / Présence
Appel d'assistance / Présence 2



Appel normal depuis le bouton rouge des mini manipulateurs NIPH-xxx (TC23....) et télécommandes de deux éclairages.



Appel normal depuis le bouton rouge et télécommande d'un seul éclairage avec le manipulateur R414200 (TC230110)

A noter :

Le buzzer de renvoi fonctionne dans une chambre lorsque l'une des deux présences est activée par le personnel de soins.

Il permet de signaler au personnel de soins dans la chambre qu'une autre chambre est en appel.

Trois tonalités permettent de distinguer le niveau d'appel en cours.

L'appel d'urgence s'effectue en exerçant une pression de 3 secondes sur le bouton vert de l'unité.

Chaque bouton possède son propre voyant. Ces voyants restent en permanence faiblement éclairés pour que l'unité puisse être facilement repérée dans l'obscurité. Lorsqu'une fonction est sollicitée (appel normal, présence, assistance...) le circuit active alors une lumière vive de confirmation ou de tranquillisation.

Note: Version après 06-2008 bornier détachable, montage câble par pression

Référence du bornier détachable: NICT-8AA Connecteur 8 points

Référence du bornier détachable: NICT-2AA Connecteur 2 points

Caractéristiques Techniques

Boîtier :

ABS, blanc

Dimensions avec plaque de fixation :

91x91x17mm (L x h x P)

Dimensions avec entretoise :

91x91x40mm (L x h x P)

Prise pour manipulateur :

à sécurité de type auto-extractible

Voyants de tranquillisation :

Leds électroluminescentes

Tension d'utilisation :

24V/DC (de 18V/DC à 30V/DC)

Consommation :

13mA (mini) 26 mA (maxi) 1 x LED on

39mA (maxi) 2 x LED on

52mA (maxi) = 3 x LED on

Par connecteur 2 et 8 points pour des fils de 0.6 mm Ø

Connexions :

connecteur 1 x 5-pin

Inter connexions :

connecteurs 8 et 2 points

Connecteurs de sortie :

max. 1A à 30V/DC max. 0,3A à 125V/AC

Contacts relais d'éclairage :

Environnement :

0 - 40°C / 80% humidité

Standards et certification :

CE IP40

Marquage Usine :

NPWU2-BFMA