


Unité d'annulation d'appel

avec prise auto-extractible pour
mini manipulateur teleCARE

REF : NPWU2-BDBA
Ancienne réf : TC112200B

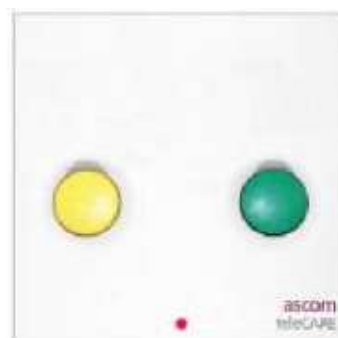

Description.

Unité d'appel murale équipée de 2 boutons et d'une prise auto-extractible pour le raccordement d'un mini manipulateur teleCARE un bouton rouge.

Utilisation système :

teleCARE SB, teleCARE SC teleCARE M
teleCARE WL (lorsque l'unité est raccordée à une unité d'appel radio)

Cette unité comprend :

- un bouton vert, annulation d'appel réservé au personnel de soins.
 - un bouton jaune, également réservé au personnel de soins.
 - une prise auto-extractible pour le raccordement d'un mini manipulateur étanche teleCARE.
 - Elle s'installe à l'aide d'une plaque de fixation qui offre l'avantage de s'adapter sur la plupart des coffrets standards d'encastrement.
- Une entretoise de fixation est également disponible pour un montage en saillie.

Quel que soit le besoin, la plaque ou l'entretoise de fixation est à commander séparément.

Accessoires complémentaires :

- Plaque de fixation	R281145 (TC811100B)
- Entretoise de fixation	R281149 (TC811150B)
- Câble de liaison pour double ou triple module	R190192 (TC810100)
- Câble de liaison pour double ou triple module avec entretoise	R190193 (TC810000)

Fonctions configurables (suivant système) :

Les fonctionnalités du bouton jaune sont paramétrables à l'aide de plots/points à souder sur le circuit imprimé. Ceci permet d'affecter à ce bouton, suivant les applications, les sorties : SET /RESET ou R+S.

Fonctions disponibles.

Annulation d'appel / Appel d'urgence / Présence



Annulation d'appel / Appel d'urgence / Présence



Appel d'assistance / Présence 2



Appel normal depuis le bouton rouge du mini manipulateur NIPH-W1A (TC232200)
Appel normal depuis le bouton rouge

A noter :

L'appel d'urgence s'effectue en exerçant une pression de 3 secondes sur le bouton vert de l'unité.
Chaque bouton possède son propre voyant. Ces voyants restent en permanence faiblement éclairés (rétro-éclairage) pour que l'unité puisse être facilement repérée dans l'obscurité. Lorsqu'une fonction est sollicitée (appel normal, présence, assistance...) le circuit active alors une lumière vive de confirmation ou de tranquillisation.

Note: Version après 06-2008 bornier détachable, montage câble par pression
Référence du bornier détachable: NICT-8AA Connecteur 8 points

Caractéristiques Techniques

Boîtier :	ABS, blanc
Dimensions avec plaque de fixation :	91x91x17 mm (L x h x P)
Dimensions avec entretoise :	91x91x40 mm (L x h x P)
Prise pour manipulateur :	à sécurité de type auto-extractible
Voyants de tranquillisation :	Leds électroluminescentes
Tension d'utilisation :	24V/DC (de 18V/DC à 30V/DC)
Consommation :	13 mA (mini) 26 mA (maxi) 1 x LED on 39 mA (maxi) 2 x LED on
Connexions :	Par connecteur 8 ou 2 points pour des fils de 0.6 mm Ø
Inter connexions :	connecteur 1 x 5-pin
Connecteurs de sortie :	1 connecteur 8 points
Interconnexion :	1 fiche broche mâle 5 points pour connecteur 5 points
Environnement :	0 - 40°C / 80% humidité
Standards et certification :	CE IP40
Marquage usine :	NPWU2-BDBA (ex réf: TC112200B)